

MASCARILLA INFANTIL LAVABLE Y REUTILIZABLE CON TEXTIL DE DOBLE CAPA


Referencia 50510



CARACTERÍSTICAS:

- Mascarilla infantil textil con tejido bacteriostático de doble capa, lavable, reutilizable y esterilizable en agua caliente.
- Permite insertar telas, tejidos u otros materiales para potenciar su efecto protector.
- Eficiente absorción de la exhalación personal, humedad, saliva y aerosol.
- Tejido de punto en relieve para aumentar el espesor y la capacidad de absorción, creando una cámara de aire para una mejor ventilación.
- Óptimo diseño sin costuras, con dos bandas laterales de sujeción para las orejas, el cual facilita un máximo confort durante su uso.
- Talla única.
- **AVISO:** esta mascarilla ha sido diseñada para responder a las necesidades de protección personales de ciudadanos, no siendo válida para uso sanitario ni como en EPP en el ámbito laboral. Fabricada de acuerdo a los estándares del Ministerio Italiano de Salud, circular N° 0003572-P del 18 de Marzo del 2020.

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN:

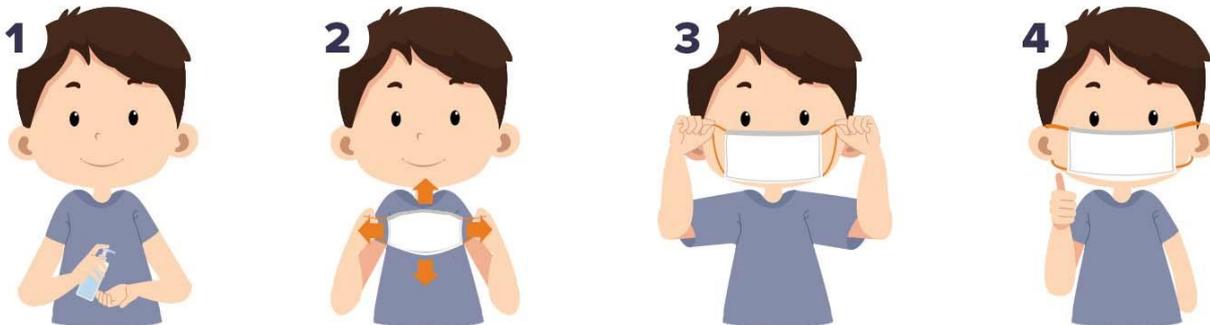

- 1. Lavar las manos:** Antes de ponerse la mascarilla, lávese bien las manos con agua y jabón, o con una solución alcohólica.
- 2. Preparar la mascarilla:** Con las manos sujetando los extremos, extender la mascarilla horizontal y verticalmente.
- 3. Colocación:** Colóquese la mascarilla sujetando los extremos, asegurándose de que cubre totalmente la nariz y la boca, de modo que el extremo inferior quede por debajo de la barbilla.
- 4. No tocar la mascarilla:** Evite tocar la mascarilla. Si necesita recolocar la mascarilla, haga uso de los extremos elásticos de las orejas. En caso de tocar la mascarilla, lávese después las manos.

COMPOSICIÓN: 86% POLIAMIDA - 16% ELASTANO

INSTRUCCIONES DE LAVADO:



MASCARILLA LAVABLE Y REUTILIZABLE CON TEXTIL DE DOBLE CAPA

Referencia

50500



Tratamiento BACTERIOSTÁTICO



LAVABLE y REUTILIZABLE



Alto poder ABSORVENTE



Textil de DOBLE CAPA



CARACTERÍSTICAS:

- Mascarilla textil con tejido bacteriostático de doble capa, lavable, reutilizable y esterilizable en agua caliente.
- Permite insertar telas, tejidos u otros materiales para potenciar su efecto protector.
- Eficiente absorción de la exhalación personal, humedad, saliva y aerosol.
- Tejido de punto en relieve para aumentar el espesor y la capacidad de absorción, creando una cámara de aire para una mejor ventilación.
- Óptimo diseño sin costuras, con dos bandas laterales de sujeción para las orejas, el cual facilita un máximo confort durante su uso.
- Talla única.
- **AVISO:** esta mascarilla ha sido diseñada para responder a las necesidades de protección personales de ciudadanos, no siendo válida para uso sanitario ni como en EPP en el ámbito laboral. Fabricada de acuerdo a los estándares del Ministerio Italiano de Salud, circular N° 0003572-P del 18 de Marzo del 2020.

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN:



1. Lavar las manos: Antes de ponerse la mascarilla, lávese bien las manos con agua y jabón, o con una solución alcohólica.

2. Preparar la mascarilla: Con las manos sujetando los extremos, extender la mascarilla horizontal y verticalmente.

3. Colocación: Colóquese la mascarilla sujetando los extremos, asegurándose de que cubre totalmente la nariz y la boca, de modo que el extremo inferior quede por debajo de la barbilla.

4. No tocar la mascarilla: Evite tocar la mascarilla. Si necesita recolocar la mascarilla, haga uso de los extremos elásticos de las orejas. En caso de tocar la mascarilla, lávese después las manos.

COMPOSICIÓN: 95% POLIAMIDA - 3% ELASTANO - 2% POLIPROPILENO

INSTRUCCIONES DE LAVADO:

